


Valitse uusi näyte. Kirjaa potilaan tiedot Potilastiedot-ikkunaan.

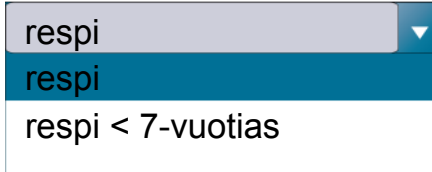

Valitse testityypiksi **respi** tai **respi < 7-vuotias** (ilman pneumokokkia).

Tulosta tarra

Tulosta viivakooditarra ja kiinnitä se mariPOC®-näyteputkeen.

1.



Käytä vain flocced swabs –nukkatikkuja näytteenottoon.


Desinfioi sakset näytteiden välillä.

2.



Lisää 1,3 ml RTI sample buffer -liuosta.

3.

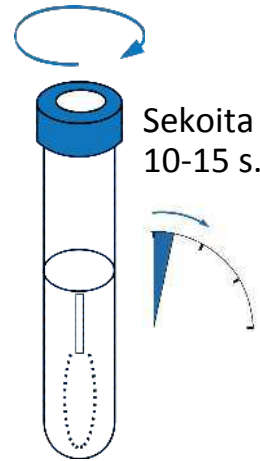

Sekoita 10-15 s.

Aseta näyteputki mittalaitteeseen. Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku.  
Automaattinen analyysi alkaa.



Tulosten raportointi

20 minuutissa: Vahvat positiiviset ja positiiviset  
2 tunnissa: Matalat positiiviset ja negatiiviset