


Valitse uusi näyte. Kirjaa potilaan tiedot Potilastiedot-ikkunaan.

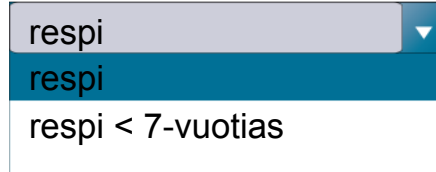

Valitse testityypiksi **respi** tai **respi < 7-vuotias** (ilman pneumokokkia).

Tulosta tarra

Tulosta viivakooditarra ja kiinnitä se mariPOC®-näyteputkeen.


1.



Annostele 0,3 ml imulimanäytettä.

Lisää 1,3 ml RTI sample buffer -liuosta.

2.

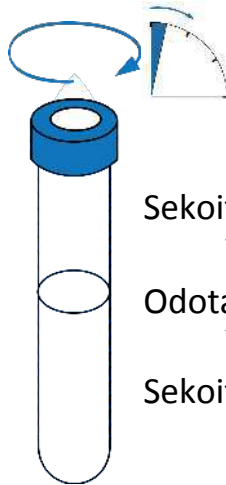

Sekoita 30 s.

Odota 2-10 min.

Sekoita 10-15 s.

3.



Sentrifugoi 5 min 1000 g.

Liman tulee jäädä pohjalle. Älä sekoita!

Aseta näyteputki mittalaitteeseen. Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku.  
Automaattinen analyysi alkaa.



Tulosten raportointi

20 minuutissa: Vahvat positiiviset ja positiiviset  
2 tunnissa: Matalat positiiviset ja negatiiviset