



Valitse	▼
Valitse	
pharyn	
Quick StrepA	


Tulosta tarra

Valitse uusi näyte. Kirjaa potilaan tiedot Potilastiedot-ikkunaan.

Valitse testityypiksi **pharyn** tai **Quick StrepA** (vain A-ryhmän streptokokki).

Tulosta viivakooditarra ja kiinnitä se maripOC®-näyteputkeen.


1.

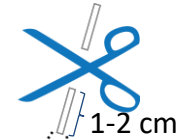

Käytä vain floccated swabs -nukkatikkuja.


Desinfioi sakset näytteiden välillä.

2.

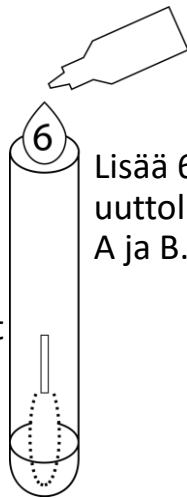

Lisää 6 tippaa uuttoliuoksia A ja B.


3.

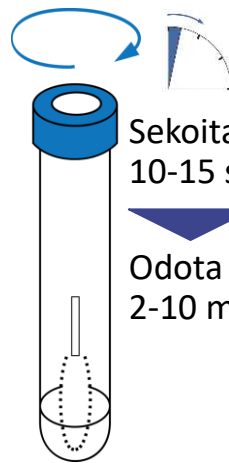

Sekoita 10-15 s.

Odota 2-10 min.

4.

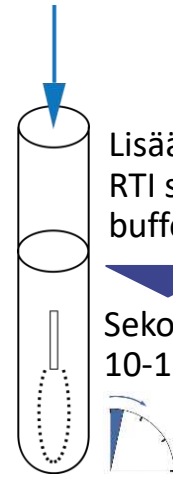

Lisää 1,3 ml RTI sample buffer -liuosta.

Sekoita 10-15 s.

Aseta näyteputki mittalaitteeseen. Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku. Automaattinen analyysi alkaa.



Tulosten raportointi

Pharyn

15 minuutissa: Vahvat positiiviset ja positiiviset
 55 minuutissa: Matalat positiiviset ja negatiiviset

Quick StrepA

15 minuutissa: Positiiviset ja negatiiviset