



Valitse uusi näyte. Kirjaa potilaan tiedot Potilastiedot-ikkunaan.

Valitse ▼

Valitse

respi

respi < 7-vuotias

Quick Flu/RSV

Valitse testityypiksi **respi, respi < 7-vuotias** (ilman pneumokokkia) tai **Quick Flu/RSV**.

Tulosta tarra

Tulosta viivakooditarra ja kiinnitä se mariPOC®-näyteputkeen.

1.



Käytä vain flocced swabs –nukatikuja näytteenottoon.


Desinfioi sakset näytteiden välillä.

2.



Lisää 1,3 ml RTI sample buffer -liuosta.

3.

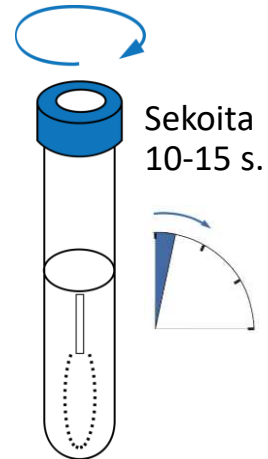

Sekoita 10-15 s.

Aseta näyteputki mittalaitteeseen. Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku.  
Automaattinen analyysi alkaa.



### Tulosten raportointi

Respi

20 minuutissa: Vahvat positiiviset ja positiiviset  
2 tunnissa: Matalat positiiviset ja negatiiviset

Quick Flu/RSV

20 minuutissa: Positiiviset ja negatiiviset