



Valitse

Valitse

respi

respi < 7-vuotias

Quick Flu/RSV


Tulosta tarra

Valitse uusi näyte. Kirjaa potilaan tiedot Potilastiedot-ikkunaan.

Valitse testityypiksi **respi, respi < 7-vuotias** (ilman pneumokokkia) tai **Quick Flu/RSV**.

Tulosta viivakooditarra ja kiinnitä se mariPOC®-näyteputkeen.

1.

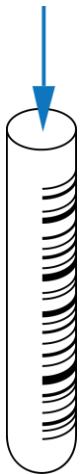

Annostele 0,3 ml imulimanäytettä.

Lisää 1,3 ml RTI sample buffer -liuosta.

2.




Sekoita 30 s.

Odota 2-10 min.

Sekoita 10-15 s.

3.

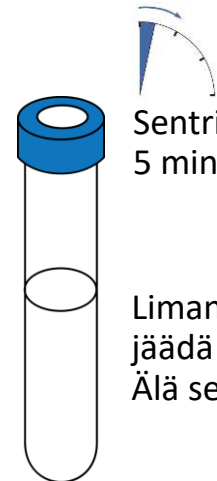

Sentrifugoi 5 min 1000 g.

Liman tulee jäädä pohjalle. Älä sekoita!

Aseta näyteputki mittalaitteeseen. Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku.
Automaattinen analyysi alkaa.



Tulosten raportointi

Respi

20 minuutissa: Vahvat positiiviset ja positiiviset
2 tunnissa: Matalat positiiviset ja negatiiviset

Quick Flu/RSV

20 minuutissa: Positiiviset ja negatiiviset