



maripoc



Gastro + CDI

maripoc Gastro

Norovirus GII.4

Norovirus GI

Rotavirus

Adenovirus

Kampylobakteeri

maripoc CDI

*C. difficile* GDH

*C. difficile* toksiiinit A/B

**TUNNISTA** *C. difficile* testaamalla GDH

**VARMISTA** infektio tunnistamalla toksiiinit A/B

**LAAJENNA** kattavuutta valitsemalla myös Gastro-testi

**Voit tehdä Gastro- ja CDI-testit samasta näytteestä!**



[www.linkedin.fi/in/maripoc](http://www.linkedin.fi/in/maripoc)



[www.twitter.com/ArcDialtd](http://www.twitter.com/ArcDialtd)

ArcDia International Oy

[www.maripoc.fi](http://www.maripoc.fi)



Kotimainen




# mariPOC® gastro ja CDI -testit täydentävät toisiaan!

mariPOC® CDI -testi on kehitetty vastaamaan ESCMIDin suositusta *C. difficile* -infektion (CDI) diagnostiikkaan. CDI-testi tunnistaa herkästi *C. difficile*lle spesifisen GDH:n ja tautia aiheuttavat toksiinit A:n ja B:n samanaikaisesti yhdestä ulostenäytteestä.

Eurooppalaisen suosituksen mukaan potilaat, joiden *C. difficile* toksiini -testitulokset on negatiiviset, tulisi jatkotestata vaihtoehdoisen diagnoosin löytämiseksi. Saman näytteen analysointi monianalyttisellä mariPOC® gastro -testillä on nopea ja kustannustehokas ratkaisu!

## ESCMIDin ohjeistus *C. difficile* -infektion diagnostiikkaan (2016)

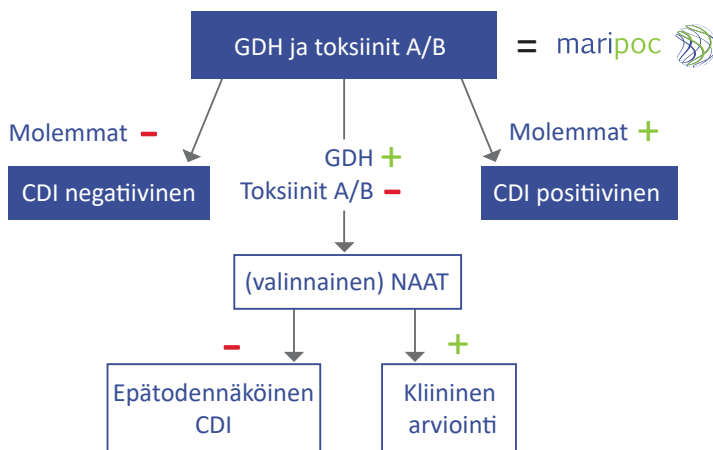

### Tulosten raportointi:


20 min positiiviset  
2 h heikot positiiviset  
negatiiviset

## Suorituskyky

Menetelmä	Herkkyys	Spesifisyys	N
<b>mariPOC® CDI-testi</b>			
<i>C. difficile</i> GDH	100 %**	98,8 %	188
<i>C. difficile</i> toksiinit A/B	>100 %**	100 %	188
<b>mariPOC® gastro-testi</b>			
Norovirus GII.4	100 %*	99,5 %	428
Norovirus GI	6 ng/ml	99,5 %	428
Rotavirus	100 %*	99,8 %	651
Adenovirus	100 %*	99,5 %	651
Kampylobakteeri	>100 %* 91 % (viljely)	97,5 %	352

\* tikkupikatesti

\*\* membraanientsyymi-immunomääritys

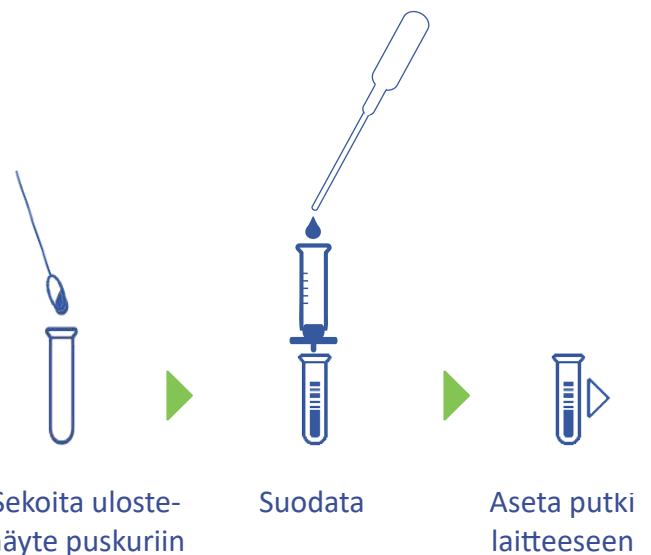

2019-09