



Valitse uusi näyte.  
Kirjaa potilaan tiedot  
Potilastiedot-ikkunaan.

Valitse


Valitse

- SARS-CoV-2
- Respi+
- Respi+ < 7-vuotias
- Quick Flu+
- Quick Flu/RSV


Valitse testityyppi.  
(Valittavissa oleva testityyppi riippuu  
käytössä olevasta testilevystä.)

Tulosta tarra

Tulosta viivakooditarra  
ja kiinnitä se mariPOC®-  
näyteputkeen.

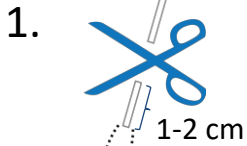

1-2 cm

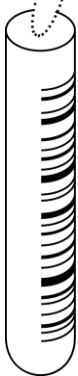

Käytä vain flocced  
swab -nukatikkuja  
näytteenottoon.


Desinfioi saksen  
näytteiden välillä.

2.



Lisää 1,3 ml  
RTI sample  
buffer  
-näyteliuosta.

3.

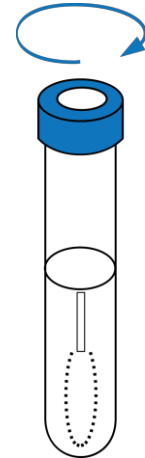

Sekoita  
10-15 s.

Huom! RTI sample buffer -näyteliuos voidaan annostella näyteputkeen (2.) ennen näytteenottoa ja näytetikon katkaisua näyteputkeen (1.). Tämä eliminoi aerosolin muodostumisen ja vapautumisen näytteen esikäsittelyn aikana.

Aseta näyteputki mittalaitteeseen.  
Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku. Automaattinen analyysi alkaa.



### Tulosten raportointi

Alustavassa vaiheessa raportoidaan  
**suurin osa positiivisista tuloksista.**  
Lopullisissa tuloksissa raportoidaan  
myös **negatiiviset tulokset.**

mariPOC®-testi	Alustavat tulokset	Lopulliset tulokset
SARS-CoV-2	20 min: +	95 min: + tai -
Respi+	20 min: +	2 h: + tai -
Quick Flu+		
Quick Flu/RSV		20 min: + tai -