



Valitse	▼
Valitse	
Pharyn	
Quick StrepA	


Tulosta tarra

Valitse uusi näyte.
Kirjaa potilaan tiedot
Potilastiedot-ikkunaan.

Valitse testityyppi.
(Valittavissa oleva testityyppi riippuu
käytössä olevasta testilevystä.)

Tulosta viivakooditarra
ja kiinnitä se mariPOC®-
näyteputkeen.


1.

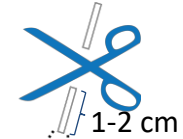

Käytä vain
flocked swab
-nukkatikkuja.


Desinfioi sakset
näytteiden
välillä.

2.

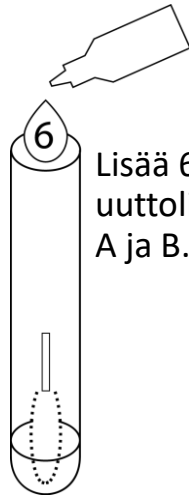

Lisää 6 tippaa
uuttoliuoksia
A ja B.


3.

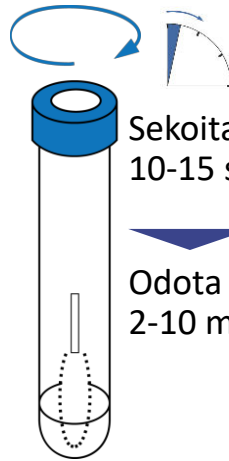

Sekoita
10-15 s.

Odota
2-10 min.

4.

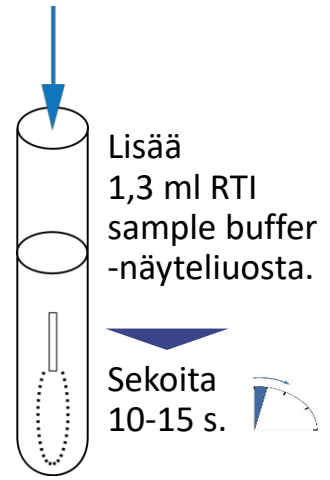

Lisää
1,3 ml RTI
sample buffer
-näyteliuosta.

Sekoita
10-15 s.

Huom! Näytteen maksimiseisotusaika uuttoliuksen vaikutuksessa on 30 minuuttia. RTI sample buffer -näyteliuksen lisäys lopettaa uuttoreaktion.

Aseta näyteputki mittalaitteeseen.
Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku. Automaattinen analyysi alkaa.



Tulosten raportointi

Alustavassa vaiheessa raportoidaan
suurin osa positiivisista tuloksista.
Lopullisissa tuloksissa raportoidaan
myös **negatiiviset tulokset.**

mariPOC®-testi	Alustavat tulokset	Lopulliset tulokset
Pharyn	15 min: +	55 min: + tai –
Quick StrepA		15 min: + tai –