



Valitse uusi näyte.
Kirjaa potilaan tiedot
Potilastiedot-ikkunaan.

Valitse ▼

Valitse

SARS-CoV-2

Respi+

Respi+ < 7-vuotias


Quick Flu+


Quick Flu/RSV

Valitse testityyppi.
(Valittavissa oleva testityyppi riippuu
käytössä olevasta testilevystä.)

Tulosta tarra

Tulosta viivakooditarra
ja kiinnitä se mariPOC®-
näyteputkeen.

1.  1-2 cm

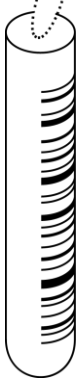

Käytä vain flocced
swab -nukatikkuja
näytteenottoon.


Desinfioi sakset
näytteiden välillä.

2.



Lisää 1,3 ml
RTI sample
buffer
-näyteliuosta.

3.

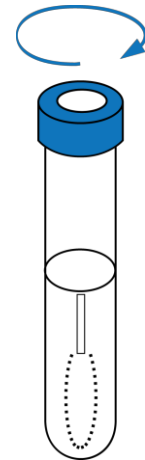

Sekoita
10–15 s.

Huom! RTI sample buffer -näyteliuos voidaan annostella näyteputkeen (2.) ennen näytteenottoa ja näytetikin katkaisua näyteputkeen (1.). Tämä eliminoi aerosolin muodostumisen ja vapautumisen näytteen esikäsittelyn aikana.

Aseta näyteputki mittalaitteeseen.
Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku. Automaattinen analyysi alkaa.



Tulosten raportointi

Alustavassa vaiheessa raportoidaan
suurin osa positiivisista tuloksista.
Lopullisissa tuloksissa raportoidaan
myös **negatiiviset tulokset.**

mariPOC®-testi	Alustavat tulokset	Lopulliset tulokset
SARS-CoV-2	20 min: +	55 min: + tai –
Respi+	20 min: +	2 h: + tai –
Quick Flu+		
Quick Flu/RSV		20 min: + tai –