



Valitse

Valitse

SARS-CoV-2

Respi+

Respi+ < 7-vuotias

Quick Flu+


Quick Flu/RSV

Tulosta tarra

Valitse uusi näyte.
Kirjaa potilaan tiedot
Potilastiedot-ikkunaan.

Valitse testityyppi.
(Valittavissa oleva testityyppi riippuu
käytössä olevasta testilevystä.)

Tulosta viivakooditarra
ja kiinnitä se mariPOC®-
näyteputkeen.

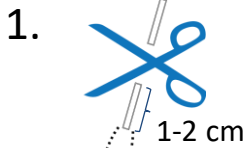

Käytä vain flocced
swab -nukatikkuja
näytteenottoon.


Desinfioi sakset
näytteiden välillä.

2.



Lisää 1,3 ml
RTI sample
buffer
-näyteliuosta.

3.

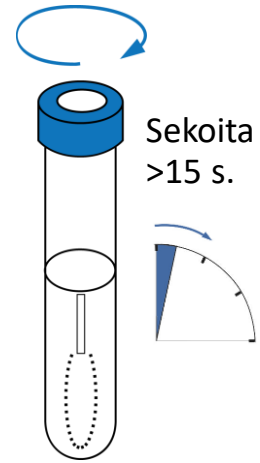

Sekoita
>15 s.

Huom! RTI sample buffer -näyteliuos voidaan annostella näyteputkeen (2.) ennen näytteenottoa ja näytetikon katkaisua näyteputkeen (1.). Tämä eliminoi aerosolin muodostumisen ja vapautumisen näytteen esikäsittelyn aikana.

Aseta näyteputki mittalaitteeseen.
Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.

Sulje näyteluukku. Automaattinen analyysi alkaa.



Tulosten raportointi

Alustavassa vaiheessa raportoidaan
suurin osa positiivisista tuloksista.
Lopullisissa tuloksissa raportoidaan
myös **negatiiviset tulokset.**

mariPOC®-testi	Alustavat tulokset	Lopulliset tulokset
SARS-CoV-2	20 min: +	55 min: + tai -
Respi+	20 min: +	2 h: + tai -
Quick Flu+		
Quick Flu/RSV		20 min: + tai -

