



Valitse uusi näyte.
Kirjaa potilaan tiedot
Potilastiedot-ikkunaan.

Valitse

- Valitse
- SARS-CoV-2
- Respi+
- Respi+ < 7-vuotias
- Quick Flu+
- Quick Flu/RSV

Valitse testityyppi.
(Valittavissa oleva testityyppi riippuu
käytössä olevasta testilevystä.)

Tulosta tarra


Tulosta viivakooditarra
ja kiinnitä se mariPOC®-
näyteputkeen.

1.



Annostele 0,3 ml
imulimanäytettä.
Lisää 1,3 ml RTI sample
buffer -näyteliuosta.

2.

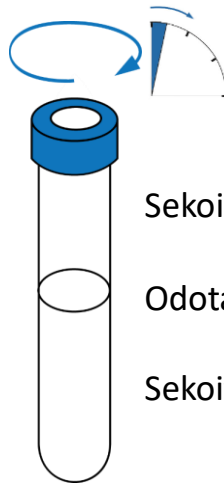

Sekoita 30 s.
Odota 2-10 min.
Sekoita 10-15 s.

3.



Sentrifugoi
5 min 1000 g.
Liman tulee
jäädä pohjalle.
Älä sekoita!

Aseta näyteputki mittalaitteeseen.
Potilasnimen tulee näkyä telineen raosta.
Sulje näyteluukku. Automaattinen analyysi alkaa.



Tulosten raportointi

Alustavassa vaiheessa raportoidaan
suurin osa positiivisista tuloksista.
Lopullisissa tuloksissa raportoidaan
myös **negatiiviset tulokset.**

mariPOC®-testi	Alustavat tulokset	Lopulliset tulokset
SARS-CoV-2	20 min: +	55 min: + tai -
Respi+	20 min: +	2 h: + tai -
Quick Flu+		
Quick Flu/RSV		20 min: + tai -

